

MO MICERIUM
ORTHODONTICS



MISTRAL PLUS

ATTACCHI AUTOLEGANTI

ortodonzia **M**[®]
GRUPPO
MICERIUM

Frizione ridotta e controllo ottimale sul movimento dei denti

L'attacco autolegante dalle altissime prestazioni.

Progettato con tecnologia innovativa, è confortevole e semplice da utilizzare. MISTRAL PLUS può essere interattivo, passivo o la combinazione di entrambi. Disponibile nelle tecniche Ideal, Bennett, Roth e New Boston, e completamente passivo nella tecnica Damon.



MISTRAL PLUS

INTERATTIVO

MISTRAL PLUS

PASSIVO

Foro di apertura

per l'inserimento dello strumento e l'apertura della clip

Ganci

integrati su canini e premolari

Bordo arrotondato

Assieme al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Clip termica in NiTi

studiata per una facile apertura e chiusura e la massima affidabilità. Ampia ed elastica per il maggior controllo rotazionale

Distanza interbracket

ampia per una migliore attivazione elastica dell'arco

Slot liscio

Lucidato a specchio per un minor attrito e miglior meccanica di scorrimento

Posizionamento accurato

linea identificativa per un più facile posizionamento sull'asse lungo del dente

Alette estese

per rendere più semplice il posizionamento delle catenelle

Profilo basso





per il comfort ottimale del paziente

Clip interattiva

Minore frizione durante le fasi di livellamento e allineamento e maggior controllo nelle fasi finali

Clip passiva


Minore frizione durante tutte le fasi del trattamento

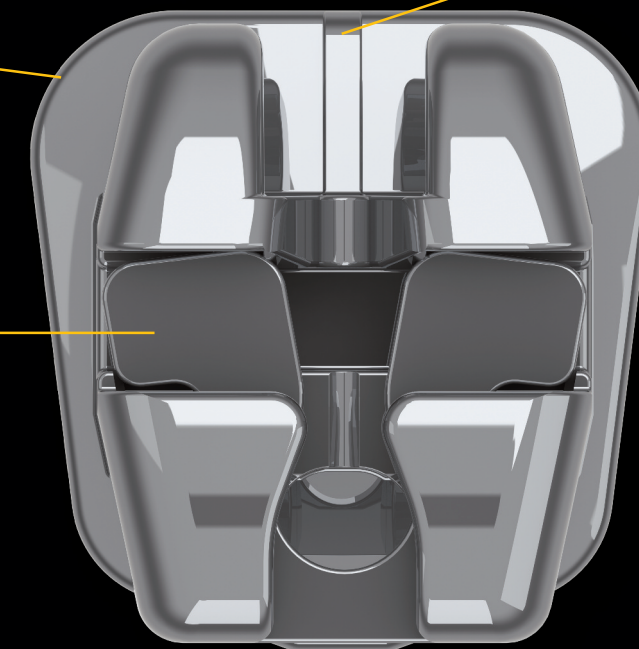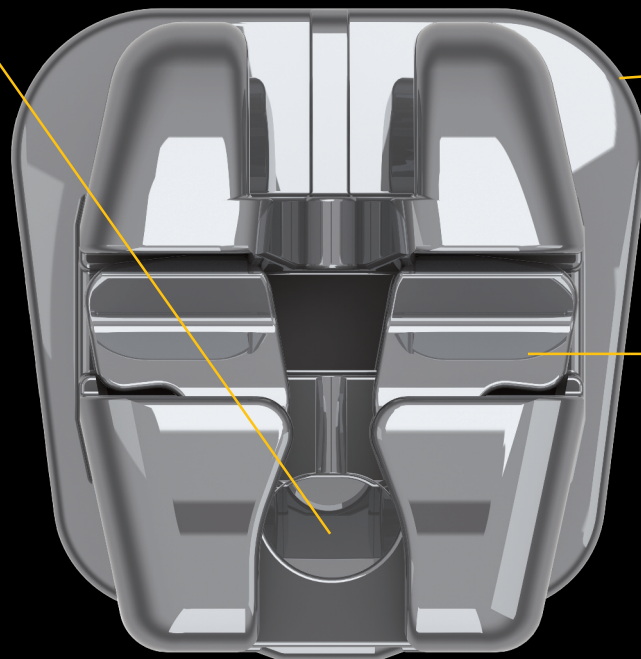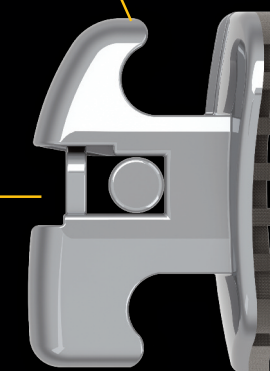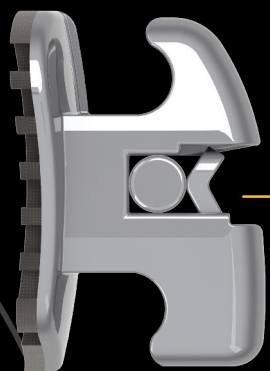

MISTRAL PLUS

ATTACCHI AUTOLEGANTI

Basetta

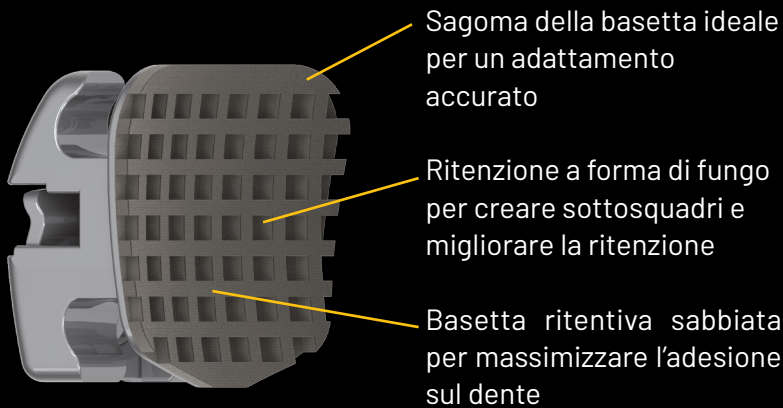

Self Ligating

I modelli di bracket interattivi e passivi autoleganti possono essere combinati in vari modi in un unico sistema:



Tutti i brackets autoleganti utilizzati sono passivi.



Brackets interattivi nella parte anteriore e passivi autoleganti nella parte posteriore.

Strumento



Facile apertura che si ottiene posizionando la punta dello strumento nella fessura della clip e Inclinando l'altro terminale in posizione gengivale.



Apertura della clip



Chiusura della clip





MISTRAL PLUS
ATTACCO AUTOLEGANTE



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 850
ortho@micerium.it
www.micerium.it