

CLED2

LED Dental Curing Light

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN Y DETECTOR DE PLACA Y DE CARIES



- >> Low 600 mW / cm²
- >> Ramp 1000 mW / cm²
- >> Estándar 1000 mW / cm²
- >> Alta 1800 mW / cm²
- >> Turbo 2400 mW / cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW / cm²
- >> Detección de placa 250 mW / cm²
- >> Detección de caries 350 mW / cm²

Ventajas

CLED2
LED Dental Curing Light

LOW

RAMP

STANDARD

HIGH

TURBO

FAST
ORTHO

PLAQUE

CARIES

Disfruta de toda la potencia de la luz en un solo gesto



La lámpara ha sido fabricada con LED de altísima luminosidad de 10W, de dos frecuencias diferentes. La longitud de onda de la luz de la CLED2 está comprendida entre 390-480nm con picos de 405/460 nm; la intensidad puede alcanzar 2400mW/cm². Puede polimerizar en 2 segundos una capa de composite de más de 2 mm. Estas características permiten actuar eficazmente también con los fotoiniciadores fenilpropodiona (PPD) y el Lucirin TPOD.

Sin apagado durante el uso


El sistema inteligente de gestión del calor impide que el dispositivo se sobrecaliente después de un uso continuo

Radiómetro integrado

Display OLED, fácil control de intensidad

Batería de cartucho

Diseño innovador y simplicidad en el modo de reemplazo

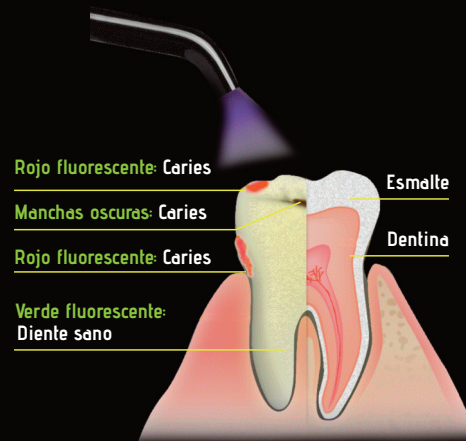

Modalidades Aplicaciones

| | |
|----------------------------|--|
| Low (baja) | Dientes y resina compuesta |
| Ramp | Grandes áreas de resina compuesta, para evitar la retracción (desprendimiento) |
| Estándar | Para la mayoría de los casos |
| High (alta) | Para ortodoncia u odontología pediátrica |
| Turbo | Cementos dentales, carillas de porcelana, postes de fibra |
| Fast Ortho | Para bandas y brackets |
| Detección de placa | Ideal para detectar placa dental. La placa y el sarro se localizan por el color rojo de la luz fluorescente |
| Detección de caries | Ideal para detectar caries. La detección de caries, con presencia de carga bacteriana, se detecta por el color rojo de la luz fluorescente o por la presencia de manchas oscuras |

WORLDWIDE DISTRIBUTOR:
Micerium SpA

Via G. Marconi, 83-16036 • Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.micerium.com

Oficina en España

Calle Verdi, 38-40 bajos 2º - 08172 San Cugat del Valles
Fax/Tel. 93 674 31 18 • michele@micerium.it • www.micerium.es

estética
M
GRUPPO
MICERIUM