

Ena[®] White 2.0



LA TÉCNICA
INNOVADORA
QUE ACELERA EL
BLANQUEAMIENTO



ENA[®] WHITE 2.0

El blanqueamiento profesional en casa más rápido con pretratamiento en consulta

Es un sistema para el blanqueamiento profesional cosmético domiciliario que comprende un cepillo de dientes especial con un dispensador que contiene el gel blanqueante a base de peróxido de hidrógeno al 6%, con el acelerador XS151™. Dicho acelerador se activa con el cepillado e incrementa de forma exponencial la velocidad de absorción del peróxido en comparación a un blanqueamiento tradicional con férula.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS

- Mayor facilidad de uso gracias al cepillo dispensador
- Mayor comodidad para el paciente, dos minutos equivalen a una noche con las molestas mascarillas blanqueadoras convencionales. Se evita la ingestión de peróxido de hidrógeno.
- Reduce el riesgo de irritación al disminuir el tiempo de contacto: 2/3 min al día en lugar de 6/8 horas para conseguir el mismo resultado de blanqueamiento que con las mascarillas.
- Un tratamiento convencional de 20 días implica un tiempo de contacto de aprox. 120/160 horas frente a 40/60 min con Ena[®]White 2.0.

ENA[®] WHITE 2.0 Precargado



Código	Descripción	C.dad
ECW01*	ENA WHITE 2.0 Professional home bleaching system Cepillo con gel blanqueador H ₂ O ₂ 6ml	1 Ud
ECW01B*	ENA WHITE 2.0 Professional home bleaching system Cepillo con gel blanqueador H ₂ O ₂ 6ml Pasta dentífrica Enamel plus 75 ml	1 Ud 1 Ud
ECW02	ENA WHITE 2.0 Professional home bleaching system Cepillo con gel blanqueador H ₂ O ₂ 6ml	2 Uds

*Pedido mínimo: múltiplos de 24 unidades en envases de 12 tubos

**Los cepillos de dientes se entregan en una caja aparte para guardarlos fácilmente en el frigorífico (véase la foto de abajo).

FASE 1 • ESTUDIO



FASE 2 • CASA



2 FASES:

1^ Ambulatorio, en el que se realiza un cepillado mecánico; **2^ Domiciliario** con el cepillo especial Ena® White 2.0 con dispensador que se rellena con gel blanqueador (suficiente para un tratamiento de aproximadamente 20 días con 2 aplicaciones diarias).

Protocolo quirúrgico ambulatorio

- Dethartraxis
- Aplicación de bicarbonato con un cepillo Smart Prophy Pink, humedecido, montado en un contra-ángulo (200/250 rpm)
- Aplicación de gel Ena® White 2.0: dejar actuar durante 10/15 min
- Aplicar el gel blanqueador con un cepillo Smart Prophy Pink seco, montado en un contra-ángulo (máx. 300/400 rpm) durante aproximadamente 30/40 segundos en cada diente y enjuagar
- Cargar Ena® White 2.0 de la jeringa al depósito del cepillo dental blanqueador
- Recargar el cepillo dental después de 20 días

Procedimiento de blanqueamiento domiciliario

- Higiene bucal
- Verter una pequeña cantidad de gel en el cepillo y cepillar los dientes a tratar durante 30/45 seg.
- Repetir el cepillado una vez más después de humedecer el cepillo con agua corriente.
- El tratamiento de blanqueamiento puede continuarse después de 20 días rellenando con la misma jeringa durante la visita de seguimiento.
- Es posible realizar otros tratamientos de blanqueamiento con nuevas recargas a intervalos mínimos de 3 meses.

ENA® WHITE 2.0

A cargar



ECW01BS



ECW6ES

Código	Descripción	C.dad
ECW01BS	ENA WHITE 2.0 Professional home bleaching system	
	Cepillo con dispensador (vacío)	1 Ud
	Reposición gel blanqueador H ₂ O ₂	11 ml
	Pasta dentífrica Enamel plus 75 ml	1 Ud

Código	Descripción	C.dad
ECW6ES	ENA WHITE 2.0 Professional home bleaching system para un tratamiento de 40 días	6 Uds
	Cepillo con dispensador (vacío)	
	Reposición gel blanqueador H ₂ O ₂	6 Uds x 11 ml

Otros paquetes disponibles previa petición