



ENACARE® White

Capillar por otros 30 segundos y enjuagar cuidadosamente



Enjuagar el cepillo con agua



Capillar los dientes a blanquear por aproximadamente 30 seg. en sentido horizontal y rotato-rio evitando las encías



Es necesaria una cantidad de gel equivalente a una pequeña lenteja



...hasta que el gel salga del agujero entre las cerdas



Rotar en sentido antihorario el anillo en la dirección "UP"...



Remover el tapón del cepillo



Es aconsejable utilizar los pro-discos de la línea ENACARE ORAL



ENACARE WHITE 2.0

BLANQUEAMIENTO DOMICILIARIO PROFESIONAL PARA USO DENTAL COSMÉTICO
Gel con 6% de peróxido de hidrógeno • 6 ml e

Atención: El tratamiento blanqueador es contraindicado para pacientes menores de 18 años. Leer las instrucciones de seguridad.

Indicaciones de seguridad: Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuagar inmediatamente durante varios minutos.

Ingredientes: Glycerine, Aqua, Carbomer, Hydrogen Peroxide, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. **Contiene:** Fluoruro de Sodio 0,05%
Este producto se puede vender sólo a dentistas: Por cada ciclo de utilización, el primer uso tiene que ser realizado por un dentista o con su directa supervisión, si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. Después puede ser entregado al paciente para completar el ciclo. Mantener alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Conservar en la nevera.



MICERIUM S.p.A.
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- Italy • Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.enacare.com
Oficina en España: Calle Verdi, 38-40 bajos 2º - 08172 San Cugat del Valles (Barcelona) Fax/Tel. +34 93 674 31 18 michele@micerium.it

Patent pending

Atención

ENA WHITE 2.0

The fastest home bleaching

Instrucciones de Uso PACIENTE

El blanqueamiento de los dientes es un proceso de remoción de los pigmentos que se forman sobre el esmalte y la dentina. Algunos dientes son demasiado pigmentados por propia naturaleza, otros se manchan a lo largo de su desarrollo. Las causas más comunes son: el envejecimiento, el uso de sustancias como el té, café, nicotina o vino, la toma de antibióticos como la tetraciclina y viejas restauraciones. El sistema de blanqueamiento elimina la mayor parte de las manchas dejando intacta la estructura del diente. Se requieren 2-3 semanas de tratamiento para obtener el resultado deseado; en algunos casos con manchas muy oscuras y rebeldes se puede alargar el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

Se tienen que seguir las instrucciones y los consejos proporcionados por nuestro odontólogo. No utilicéis más producto del necesario y no aumentéis el tiempo de aplicación, porque no obtendríais ni un mayor ni más rápido tratamiento. Solamente vuestro odontólogo podrá determinar la duración del tratamiento. Antes de empezar el tratamiento blanqueante es aconsejable proceder con la higiene oral (se recomienda el uso de la pasta dentífrica Enamel Plus, de baja abrasividad, desensibilizante y ligeramente blanqueante y el hilo interdental IF Interdental Floss de la línea Ena® Oral Care. El nuevo envase permite realizar el tratamiento también fuera de casa, en el ambiente de trabajo, al gimnasio... utilizando antes la toallita Digital Brush para limpiar los dientes). Después proceder como indicado:

- sujetar el cepillo ENA® WHITE 2.0 y remover el tapón.

- rotar en sentido antihorario el anillo a la base del cepillo en la dirección "UP" hasta que salga una cantidad de gel como una pequeña lenteja (después de la primera aplicación, hecha bajo supervisión del dentista, es suficiente rotar el anillo de 2-3 vueltas), y cepillar los dientes por aproximadamente 30 segundos evitando las encías.

- enjuagar el cepillo con agua y cepillar los dientes por otros 30 segundos, después enjuagar la boca con agua. NOTA: el tiempo de aplicación indicado es suficiente para un tratamiento limitado a los 6 dientes centrales superiores. Si quiere blanquear también los dientes inferiores, se tiene que aumentar el cepillado de 15 segundos.

- volver a cerrar el cepillo con el tapón. Para evitar que el gel sobresalga del cepillo, especialmente durante el transporte, rotar el anillo en la dirección "DOWN".

- repetir 2-3 veces al día, preferiblemente después de la higiene oral.

Durante el tratamiento blanqueador evitar de: fumar, beber té, café, coca cola, vino tinto, comer soja, alcahofas, mermeladas oscuras, cítricos, utilizar dentífricos o colutorios que contengan yodo o clorexidina y todo aquello que pueda causar coloraciones oscuras. Terminado el tratamiento blanqueador fijar una cita de control con el odontólogo para valorar el resultado y decidir si son necesarias posteriores aplicaciones.

PRECAUCIONES:

¡Atención! Retire el sello antes de su uso

1. El tratamiento blanqueador es contraindicado para pacientes menores de 18 años.
2. Este producto se puede vender sólo a dentistas. Por cada ciclo de utilización, el primer uso tiene que ser hecho por un dentista o con su directa supervisión, si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. Después puede ser entregado al paciente para completar el ciclo.
3. Anotar la fecha de caducidad sobre la confección, indicada por el símbolo de la deksida (mes/año).
4. Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuagar inmediatamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
5. Las mujeres embarazadas no deben banquearse los dientes.
6. Las coronas e incrustaciones no responden al blanqueamiento.
7. Si tiene preguntas relativas al uso admisible de este producto, por favor pregunte a su odontólogo lo antes posible.
8. Un porcentaje pequeño de pacientes presentan sensibilidad durante el proceso de blanqueamiento. Si esto ocurre interrumpir el tratamiento y consultar su odontólogo.
9. Los alimentos y los jugos con gran contenido de ácido cítrico pueden ocasionar sensibilidad en los dientes.
10. Algunos pacientes han advertido alguna incomodidad temporal en las encías, labios, garganta o lengua. Si alguno de estos síntomas persiste más de 2 días o empeora progresivamente, es aconsejable llamar a su odontólogo. Estos efectos colaterales generalmente disminuyen en 1 o 3 días después de suspender el tratamiento.
11. Con el pasar del tiempo el café, el tabaco y otros productos pueden volver a manchar los dientes; en este caso se pueden volver a blanquear en el plazo de pocos días.
12. Los chequeos y las limpiezas dentales regulares son importantes antes y después del blanqueamiento para mantener una sonrisa saludable.
13. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
14. No trague el gel ni los enjuagues. El producto contiene peróxido; la ingestión de grandes cantidades de producto puede resultar perjudicial.
15. Después de su utilización, enjuagar cuidadosamente los labios y todo su contorno.
16. Mantener el producto alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Conservar ENA® WHITE 2.0 en la nevera; se puede conservar el producto a temperatura ambiente (20°C) un máximo de 2/3 semanas. Si se interrumpe el tratamiento poner el producto en la nevera.
17. No dispensar en el ambiente el producto. Eliminar como residuo sólido urbano después de haber enjuagado el gel en el dispensador y en el cepillo (si es necesario, rellenar el dispensador con agua y escurrir).