

ENA[®] WHITE 2.0

The fastest professional home bleaching

DE QUE FORMA EL DENTISTA PUEDE PROPONER ENA WHITE 2.0 A SU PACIENTE?

UN TRATAMIENTO PROFESIONAL SIGUIENDO LOS SIGUIENTES PASOS

1 DIAGNÓSTICO DEL CASO

Verificación de alergias, intolerancias o presencia de contraindicaciones

2 PRE-TRATAMIENTO DE PROFILAXIS EN LA CLÍNICA

Escaladores periodontales, profilaxis Ena Care con gomas y cepillos



3 PRIMER TRATAMIENTO EN LA CLÍNICA Y ENTREGA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES

La primera aplicación debe hacerse en la clínica bajo la supervisión del dentista que luego entregará al paciente el producto con los consejos para continuar el tratamiento domiciliario



Desenrosque y retire la tapa del cepillo de dientes



Retire el sello de la base del cepillo de dientes con unas pinzas



Desenrosque la cabeza del cepillo de dientes retirándolo del dispensador



Atornille nuevamente el cepillo



Gire el dial en sentido anti horario en la dirección UP hasta que el gel sobresalga desde el agujero entre las cerdas. Es necesaria una dosis igual al volumen de una pequeña lenteja



El paciente debe cepillar los dientes a blanquear durante 30 segundos evitando en la medida de lo posible el contacto con la encía



Enjuague las cerdas bajo el agua corriente



Cepille nuevamente durante otros 30 segundos y enjuagar bien

4 EL CONTROL DEL TRATAMIENTO

Al cabo de 15 / 20 días se controlará con el paciente el resultado obtenido para proceder, si el paciente aún no está del todo complacido, a una ulterior fase de tratamiento



DE QUE FORMA EL DENTISTA PUEDE PROPONER ENA WHITE 2.0 A SU PACIENTE?

- Por qué mejora la comodidad del paciente en comparación con otros sistemas de blanqueamiento?
- Porque aumentando la satisfacción del cliente se incrementará el número de pacientes interesados en un tratamiento de blanqueamiento
- Porque se ahorrará significativamente en los costos de las férulas (tomas de impresión, modelo con resina espaciadora, hoja termoplástica, moldura y acabado)
- Porque se simplifican los procedimientos y también como tratamiento de mantenimiento
- Porque reduce el riesgo de irritación y sensibilidad ya que disminuye significativamente el tiempo de contacto del diente con el gel blanqueador
- Porque se reduce el riesgo de ingerir peróxido de hidrógeno
- Porque aumenta la previsibilidad del resultado dada la simplicidad de aplicación, preferiblemente realizada inmediatamente después de la higiene oral, en comparación con molestas férulas, que pueden disuadir fácilmente al paciente de un uso continuo perjudicando el resultado



EN CONCLUSIÓN

>> RESULTADOS SEGUROS

>> PACIENTES SATISFECHOS

>> MAYOR NÚMERO DE TRATAMIENTOS REALIZADOS



**POR QUÉ EL DENTISTA DEBERIA PROPONER
ENA WHITE.2.0**



- Porque es tan fácil como cepillarse los dientes
- Porque elimina las molestas férulas que a menudo causan la interrupción del tratamiento, mejorando el confort
- Porque el innovador envase permite realizar el tratamiento incluso fuera del hogar, en la oficina, en el gimnasio, estando de viaje...
- Porque, pudiendo utilizarlo con regularidad y sin esfuerzo, lo aconsejará a familiares y amigos



ENA[®] WHITE 2.0

The fastest professional home bleaching

UNA RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

DENTISTA DEBERÁ RECOMENDAR AL PACIENTE SEGUIR UNA CORRECTA HIGIENE ORAL DURANTE Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PARA OBTENER UN RESULTADO DE LARGA DURACIÓN



Recomendamos la pasta de dientes enamel Plus, de baja abrasividad (25RDA), con efecto desensibilizante y blanqueante, para proteger las encías durante y después del tratamiento de blanqueamiento, evitando irritaciones.

... y otros productos de la línea Ena Care



ENA  CARE
Oral

MICERIUM S.p.A.
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) - I • Tel. 0185 7887 870
ordini@micerium.it • www.micerium.it
File: dentist Pres ES v1_1_04-2015

