

(ES)

## El sistema Ena Matrix incluye:

- Matrices seccionales "THIN" 35 micrones, disponibles en las siguientes medidas: Small para pedodoncia; Medium y Large para restauros supragingivales; Subgingival para restauraciones del área subgingival
- Cuñas de madera anatómicas, clasificadas por color, disponibles en 3 medidas: pequeñas (blanco); medianas (rosa); grandes (violeta)  
Estos accesorios se venden por separado
- Anillos disponibles en Ni-Ti en dos medidas: para molares (negro); para premolares y pedodoncia (rojo)
- Anillos en acero inoxidable (alternativos a los anillos en Ni-Ti)
- Pinzas para anillos

## Indicaciones

Restauraciones de clase II para facilitar el contorneado de materiales de restauración.

## Advertencias

- Utilizar siempre un dique de goma para evitar que el paciente pueda inhalar o ingerir las piezas.
- Los artículos de consumo (cuñas, matrices) son monouso
- Para garantizar la esterilidad, tratar en autoclave los anillos y las pinzas antes de su uso (134°C durante un mínimo de 3 minutos).

## Instrucciones de uso

A. Sostener la matriz con la pinza.

B. Posicionar la matriz interproximalmente, sobre la preparación.

C. Mantener el dedo índice sobre la matriz para evitar el movimiento. Indicar a la auxiliar que coja una cuña de la medida adecuada con la pinza. Insertar la cuña al lado vestibular y empujarla hasta el fondo.

D. Pedir a la auxiliar que le alcance el anillo ya insertado en la pinza con el bloqueo abierto. NO TENGA PRISA. Utilizando un dedo para estabilizar la pinza, posicionar muy lentamente el anillo de forma que bloquee la cuña, asegurando que sea en contacto directo con el mismo, sin que pueda moverse en sentido apical.

## Notas

Las puntas de las aletas del anillo tienen que estar cerca del margen gingival y el slot del anillo en contacto con la cuña. A veces es mejor posicionar el anillo distalmente: un ejemplo es una MOD o una DO.



**MICERIUM S.p.A.**

Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) - Italy

Tel. 0185 7887.870 • Fax 0185 7887.970

www.micerium.it • email: micerium@micerium.it

