

# MICRO ARENADORA DENTOPREP: ¡TOTALMENTE EN ACERO!

Las microporosidades aumentan la retención mecánica hasta un 40%

## APLICACIONES EXTRAORALES:

- Coronas metal-cerámicas
- Pernos
- Inlay y Onlay
- Puentes Maryland
- Desincrustaciones de cemento

## APLICACIONES INTRAORALES:

- Reparaciones de cerámica y composite
- Limpieza de la superficie antes de cementar

## CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizable hasta 135°C
- Fácil conexión a la turbina

Códigos	Descripción
<b>RON1900</b>	Arenadora Dento-Prep de clínica
<b>RON1903</b>	DENTOPREP DUST-CABINET 230Volts Sistema aspirante con luz en el interior Alto x largo x ancho 180 x 15 x 225 mm. (4.130 Kg.)
<b>RON1906</b>	Óxido de aluminio 50 micron 1 kg
<b>RON1926</b>	Conector Dentoprep 6 mm
<b>RON1930</b>	Conector Dentoprep Midwest
<b>RON1935</b>	Conector Dentoprep Sirona
<b>RON1936</b>	Conector Dentoprep W e H
<b>RON1937</b>	Conector Dentoprep Kavo
<b>RON1938</b>	Conector Dentoprep Bien Air
<b>RON1939</b>	Conector Dentoprep NSK

## ¡OFERTA EXCEPCIONAL!

### SISTEMA DE REPARACIÓN TENDER C04R1

- Kit de reparación Tender COSRIP1
- + Arenadora Dentoprep RON1900
- + partículas de óxido de aluminio RON1906
- + 1 conector a elegir

regalo  
regalo

### SISTEMA DE REPARACIÓN TENDER C04R2

- Sistema aspirante Dust Cabinet RON1903
- + Arenadora Dentoprep RON1900
- + Kit de reparación Tender COSRIP1
- + Partículas de óxido de aluminio RON1906
- + 1 conector a elegir

regalo  
regalo  
regalo



FILE: TENDER REPAIR ES v.2\_09-2011

**Tender**  
System *repair*

*Reparaciones  
en cerámica  
sin ácido*



- *Mayor Biocompatibilidad*
- *Sin riesgos para los tejidos*
- *Mayor adhesión*

**MICERIUM S.p.A.** Via G. Marconi, 83 -16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. (+39) 0185 7887 880 Fax (+39) 0185 7887 970

**Oficina en España:** Tel./Fax (+34) 93 674 3118  
mario.schilman@micerium.it - www.micerium.it

estefica  
**M**  
GRUPPO  
MICERIUM


# REPARACIÓN RÁPIDA, SEGURA Y FIABLE



**1** *arenado*



**2** *Tender Bond*  
sobre metal y cerámica

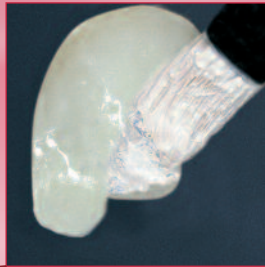

**3 a.**  
*Tender opaque*  
sobre metal



**3 b.**  
*Tender clear*  
sobre cerámica




**4** *Composito dentina*

Enamel plus HRi  
con pinceles en silicona  
TPENS




**5** *Composito esmalte*

Enamel plus HRi  
esmaltes opalescentes,  
intensivos y genéricos

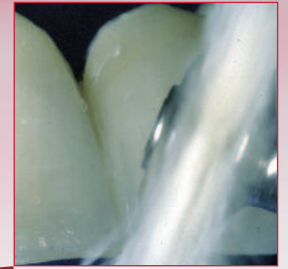

**6** *Pulido*

Enamel plus SHINY.  
Las pastas diamantadas  
se utilizan con cepillo.  
La pasta de óxido de  
aluminio con fieltro.

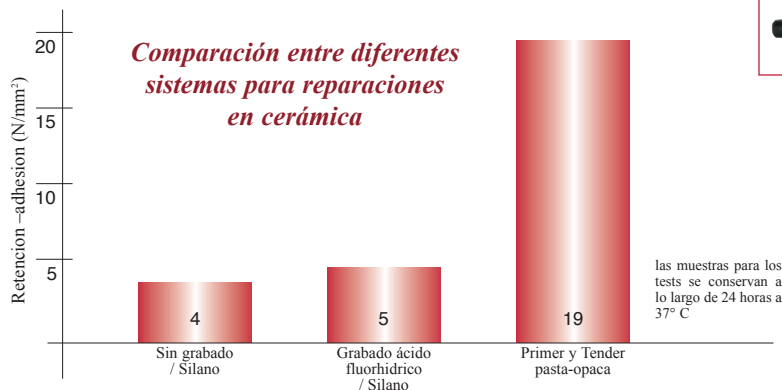

**KIT REPARACIÓN TENDER PARA CERÁMICA - REF. COSRIP2**

1x2,5ml Tender Bond Metal-Ceramic Primer  
1x3gr. Tender Paste Opaque Clear para adhesión/cobertura cerámica  
1 pincel Enamel Plus "M"

**KIT REPARACIÓN TENDER PARA CERÁMICA & METAL - REF. COSRIP1**

1X2,5ml Tender Bond Metal-Ceramic Primer  
1x3gr. Tender Paste Opaque Clear para adhesión/cobertura cerámica  
1x3gr. Tender Past Opaque O2 para adhesión/cobertura metal  
1 pincel Enamel Plus "M"